



Bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz – bu ürünün nasıl kullanılacağı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen eczacınıza veya doktorunuza danışınız ya da bizimle iletişime geçiniz.

REMOGEN® OMEGA-3 YAĞ ASİDİ İÇEREN GÖZ DAMLALARI, 20 ADET FLAKON (0.25ml/flakon)

Kullanım amacı: göz kayganlaştırıcı.

REMOGEN® OMEGA nedir?

REMOGEN® OMEGA, kayganlık sağlayan polimerler ve çoklu doymamış yağ asitlerinin mikroemülsiyonu ve nemlilik sağlayan göz damlasıdır. Sterildir, koruyucu içermez.

İçerik: 1 ml solüsyonda eikosapentaenik asit (EPA) etil ester, dokosaheksaenik asit (DHA etil ester, α -tokoferil asetat (E vitamini), gliserol, poliakrilik asit, akrilatlat/alkil akrilat crosspolimer, sodyum hidroksit, disodyum fosfat ve enjeksiyonlar için su bulunur. Mikroemülsiyon fizyolojik pH değeri ile hipotoniktir.




REMOGEN® OMEGA ne zaman kullanılır? Endikasyonları nelerdir?

REMOGEN® OMEGA göz kuruluğu, yanma ve rahatsızlık hissine neden olan gözyaşı filminin instabilitesinde ve kalitatif-kantitatif her türlü değişim durumlarında oküler yüzeyi yeniler, kayganlaştırır, besler, nemlendirir ve korur. Yüzeysel keratit, Sjögren sendromu veya birincil kuru göz sendromu gibi hastalıklara bağlı olarak gelişebilen kuru göz ve/veya oküler yüzey hasarı belirtileri için kullanılabilir. Yanma, oküler yorgunluk ve patolojik bulgusu olmayan diğer küçük şikayetler örneğin; toz, duman, kuru ısı, klima, rüzgar, soğuk, genişletilmiş bilgisayar ekranı kullanımı, immün sistem rahatsızlıklarında, gözyaşı salgısını azaltabilen ilaçların kullanımından dolayı oluşabilen kuruluk hissinde gözlerin kayganlaştırılması için kullanılabilir. Kornea ve konjonktiva epitelindeki koruyucu etkisinden dolayı REMOGEN® OMEGA tüm oküler tahriş vakalarında kullanılabilir.

REMOGEN® OMEGA hangi sıklıkta ve nasıl kullanılmalıdır?

Ürünün kapağını bükerek açın. Başınızı geriye doğru eğin ve ürünün ucunu tedavi edilecek gözün üzerine yerleştirin. Alt göz kapağınızı işaret parmağınız ile aşağı doğru çekin. Hafif bir basınç ile birlikte REMOGEN® OMEGA şişeden kolayca akacaktır. Aksi tavsiye edilmezse, 1 veya 2 damla REMOGEN® OMEGA'yı gözünüze damlatın. Göz kırptıktan sonra, solüsyon dağılacak ve gözün yüzeyinde uzun süreli, şeffaf bir kaplama oluşturacaktır.

REMOGEN® OMEGA, kontakt lens kullanırken (sert veya yumuşak) de uygulanabilir.

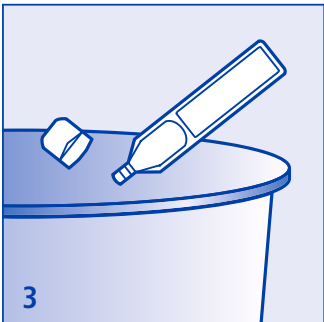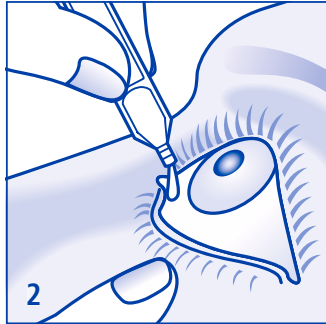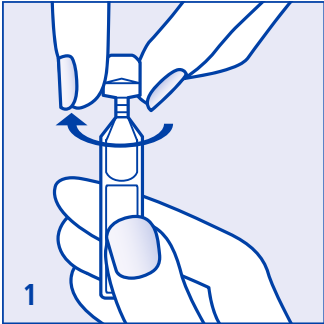

REMOGEN® OMEGA kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

Flakonu açtıktan sonra ucuna ve gözün yüzeyine şişenin açık ucuyla dokunmayın. Aksi halde, solüsyonun sterilliği garanti edilmez ve bu da enfeksiyona neden olabilir. Alüminyum poşet hasar görmüşse REMOGEN® OMEGA'yı kullanmayın.

REMOGEN® OMEGA'nın saklama ve kullanma koşulları:

2°C ila 8°C arasında saklayın! REMOGEN® OMEGA'yı belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Bu aralık buzdolabında saklanan ürünü refere etmektedir (2°C - 8°C). Buzdolabının dışında, 25 °C'nin altında ve orijinal ambalajında depolandığında, ürünün raf ömrü 3 aydır. Ürünü ışıktan uzak tutup, tek dozluk flakonları alüminyum poşetinde saklayın. REMOGEN® OMEGA'nın kullanımı sırasında rahatsızlık hissini devam etmesi durumunda hekime başvurun. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

REMOGEN® OMEGA'nın özellikleri ve etki mekanizması:

REMOGEN® OMEGA, gliserol, poliakrilik asit ve akrilatlar/alkil akrilat gibi nemlendirici ve yumuşatıcı maddeler içeren bir aköz madde içerisinde lipid moleküllerin (aynı zamanda fizyolojik gözyaşı oluşumunu sağlayan yağ asitleri ve E vitamini) mikrometrik dağılımının hipotonik mikroemülsiyonudur.

REMOGEN® OMEGA, gözyaşı filminin üç katmanında etki gösterir. Aköz tabakadan evaporasyonu önler ve doğal gözyaşı filminin ince tabakasını yenileyerek gözyaşı oluşumunu sağlar. Oküler yüzeye tutunan, suyu muhafaza eden ve gözyaşı filminin stabilizasyonunu sağlayan REMOGEN® OMEGA, bu sayede korneal ve konjunktival epitelyumu koruyan hidrofilik bir film oluşturur.

Hipotonik bir mikroemülsiyon olan REMOGEN® OMEGA, aynı zamanda oküler yüzeyin fizyolojik olmayan durumu ile sıklıkla ilişkilendirilen gözyaşı filmi hipe-rozmolaritesini dengeler.

REMOGEN® OMEGA, oküler yüzeye zarar verebilecek yüzey etkin maddeleri ve koruyucu maddeler içermez.

REMOGEN® OMEGA'nın herhangi bir bileşene karşı hassasiyeti yoktur.

REMOGEN® OMEGA'nın etki şeklini değiştirebilecek olması nedeniyle göze uygulanan başka bir ilaç veya ürün ile aynı anda kullanmayın. İki farklı ürünün göze uygulanması için ilk üründen sonra en az 15 dakika beklenmelidir.

REMOGEN® OMEGA kullanımı sonrasında bazı nadir durumlarda, gözde konjunktiva iritasyonu, yabancı cisim hissi, göz sulanması veya kirpiklerin yapışması, kaşıntı, kızarıklık, acı veya yanma hissi, ayrıca kısa süreli bulanık görme meydana gelebilir.

Paket içeriği:

5 adet 0.25 ml tek kullanımlık flakon içeren 1 adet alüminyum poşet
5 adet 0.25 ml tek kullanımlık flakon içeren 2 adet alüminyum poşet
5 adet 0.25 ml tek kullanımlık flakon içeren 4 adet alüminyum poşet

ÜRETİCİ: TRB CHEMEDICA AG Otto Lilienthal Ring 26

85622 Feldkirchen/Munich, Germany Tel: +49 89 46 14 83 0

İTHALATÇI: Doktrinmed İlaç San. Ltd. Şti.

Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis Blok Apt. No:29/A-162, 34400 Kağıthane, İstanbul
Tel: +90 212 803 89 62 | www.doctrinmed.com



Parti Numarası

STERILE A

Aseptik proses teknolojisi kullanılarak sterilize edilmiştir.



Son Kullanma Tarihi

2°C - 8°C

Saklama Sıcaklığı: 2°C - 8°C



Tek Kullanımlıktır



Kullanma Talimatlarına Bakınız